



Materiaal SurePath®Collection Vial

Bewaar het afnamemateriaal steeds op kamertemperatuur (15-30°C).

Gebruik het afnamemateriaal nooit na overschrijding van de vervaldatum.

Na afname kan het staal 2 maanden in het medium bewaard worden bij kamertemperatuur (15-30°C) zonder kwaliteitsverlies voor de uitvoering van PCR HPV.

Gebruiksaanwijzing

STAP 1

Controleer eerst de vervaldatum van het afnamemateriaal en gebruik nooit materiaal met overschreden vervaldatum. Kleef de sticker met patiëntidentificatiegegevens op het recipiënt.

STAP 2


Voor de celcollectie is de gesteelde Cervex-Brush® beschikbaar.

Breng de Cervex-Brush® met de witte borstelharen in het endocervicaal kanaal.

Roteer de Cervex-Brush® onder zachte druk 5 keer in wijzerzin.

STAP 3

Plaats na borstelafname de borstel met celmateriaal in de grote opening van het (BD SurePath®Collection Vial. Draai de borstel een kwartslag en maak gebruik van het plastic frame in het potje om de borstelkop van de steel los te trekken. (Belangrijk: de gehele borstelkop moet worden achtergelaten in het potje om al het afgenomen materiaal ter beschikking te stellen voor analyse in het laboratorium. Draai het dekseltje stevig op het potje.

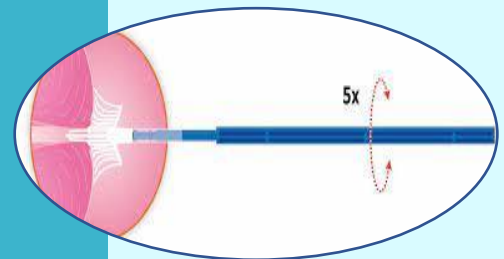

Transport naar het laboratorium

Plaats de container in het harde kunststof hoesje in de SafetyBag®, verwijder de witte strip van de blauwe band aan de bovenzijde van het zakje en plak het zakje goed dicht. Het materiaal verzenden naar Pathan B.V. d.m.v. een verzendenvolp vergezeld van een ingevuld aanvraagformulier met de nodige klinische gegevens.

